




## Номограмма для One Use-Plus с металлическими ОВАЛЬНЫМИ кольцами [международная]

SBK

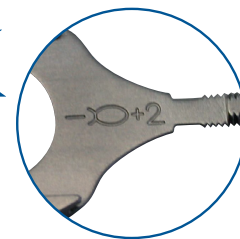

Горизонтальная К	Кольцо	Стоп	Вертикальный диаметр	Доступный горизонтальный диаметр	Размер ножки	Особые указания
39	+1	7.0	9.0	8.5	4.5	маленькая/большая*
	+1	7.5	9.0	9.0	4.5	
40	+1	7.0	9.0	8.5	4.5	маленькая/большая*
	+1	7.5	9.0	9.0	5.0	
41	+1	7.5	9.0	9.0	4.8	
	+2	7.5	8.7	8.6	4.6	
	+3	7.5	8.0	8.5	4.5	
42	+1	8.0	9.0	8.8	4.1	большая: стоп 7.5
	+2	7.5	8.7	8.6	4.6	
	+3	7.0	8.5	8.0	4.5	маленькая/большая*
43	+1	8.0	9.0	8.8	3.5	
	+2	7.5	8.7	8.5	4.4	
	+3	7.5	8.0	8.0	4.0	маленькая: стоп 7.0
44	+1	8.0	9.0	9.5	3.5	
	+2	7.5	8.5	8.5	4.3	
	+3	7.5	7.8	8.3	4.3	маленькая: стоп 7.0
45	+1	8.0	8.8	9.0	3.8	большая: стоп 7.5
	+2	7.5	8.0	8.0	4.0	
	+3	7.5	7.8	8.0	4.0	
46	+2	8.0	8.5	9.0	4.0	большая: стоп 7.5
	+3	7.5	8.0	8.0	4.0	маленькая: стоп 7.5
47	+3	7.5	7.5	8.0	4.0	маленькая*
	+3	8.0	7.5	8.3	3.5	
48	+3	7.5	< 8.0	> 8.0	4.0	
49	+3	7.5	< 8.0	> 8.0	4.0	

Определите значение горизонтальной К, округлите значение до ближайшего целого числа (например, для  $42.5 \leq K \leq 43.4$  округлить до 43), выберите соответствующее кольцо и значение стопора. Отцентрируйте кольцо по краю лимба т.о., чтобы склера не появлялась внутри кольца назально.

- На **маленькой роговице (WTW <11.0 мм)** с одним и тем же выбранным кольцом и кератометрией полученный лоскут может быть больше, чем планировалось. Выбирайте клапан меньшего размера.
- На **большой роговице (WTW >12.0 мм)** с одним и тем же выбранным кольцом и кератометрией полученный лоскут может быть меньше, чем планировалось. Выбирайте клапан большего размера.

\*Рекомендуемые значения кольца и стопора для маленькой, большой или обоих типов роговиц.

Показатели могут отличаться от номограммы в зависимости от разных факторов, связанных с пациентом (ВГД, степень близорукости, возраст, пол, этническая принадлежность, кератометрия и т.д.), и факторов, связанных с операцией (гидратация роговицы, продолжительность вакуума и т.д.). Номограмма является лишь общим руководством. Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый хирург составил свою собственную номограмму. Moria не несет ответственности за любой прямой, случайный, логически вытекающий или примерный ущерб, понесенный какой-либо стороной, даже если эта сторона не была предупреждена о возможности такого ущерба.



## Номограмма для One Use-Plus с металлическими ОВАЛЬНЫМИ кольцами [международная]

# SBK



### Работа с номограммой


#### 1. Роговицы с диаметрами между 11.0 и 12.0 мм.

Определите номер кольца и значение стопора на нём в зависимости от горизонтальной кератометрии. Округлите значение горизонтальной К до ближайшего целого числа, следуя примеру: если  $42.5 \leq \text{Горизонтальная К} \leq 43.4$ , округлить до 43.

#### 2. Роговицы с диаметрами <11.0 или >12.0 мм требуют корректировки значений номограммы.

Диаметр роговицы влияет на диаметр лоскута. На маленьком глазу в вакуумном кольце будет выступать больше ткани роговицы, а на большом - меньше. С одними и теми же кольцом и кератометрией лоскут, полученный на маленьком глазу, будет больше, чем лоскут, полученный на большом глазу. Перед операцией измерьте горизонтальный размер White-to-White, и в случае необычных размеров роговицы (<11.0 и > 12.0 мм) скорректируйте номограмму и выберите кольцо и значение стопора, учитывая, что:

- На **маленькой роговице (WTW <11.0 мм)** с одним и тем же выбранным кольцом и кератометрией полученный лоскут может быть больше, чем планировалось. Выбирайте клапан меньшего размера.
- На **большой роговице (WTW >12.0 мм)** с одним и тем же выбранным кольцом и кератометрией полученный лоскут может быть меньше, чем планировалось. Выбирайте клапан большего размера.

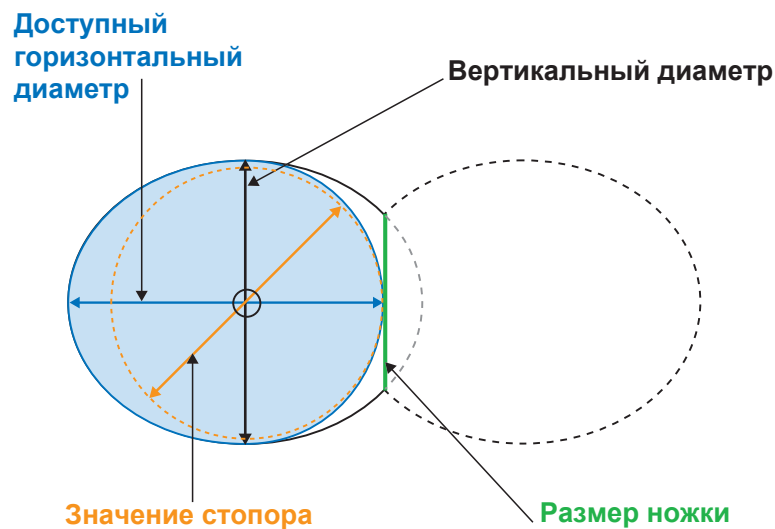

Moria не рекомендует использовать One Use-Plus на глазах с толщиной роговицы менее 500 микрон.

Moria рекомендует центрировать вакуумное кольцо по лимбу.

Moria рекомендует использовать Скорость 2 (Speed 2).

Самая последняя версия номограммы доступна на веб-сайте MORIA:

<http://www.moria-surgical.com>

Для получения  
дополнительной  
информации

**MORIA SA**  
23 Av. Carnot,  
91300 Massy  
FRANCE  
Phone: +33 (0) 1 46 74 46 74  
Fax: +33 (0) 1 46 74 46 70  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)



0120

**MORIA Inc**  
1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
Phone: (800) 441 1314  
Fax: + 1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**MORIA JAPAN KK**  
Inami Bldg. 6F  
3-24-2 Hongo Bunkyo-ku  
Tokyo 113-0033  
JAPAN  
Phone: + 81 3 5842 6761  
Fax: + 81 3 5842 6762  
[www.moriajapan.com](http://www.moriajapan.com)